

Инструкция по сборке и эксплуатации


Кушетка смотровая М111-039 (вид 187250)

Изделие изготовлено в соответствии с
ТУ 9452-001-16789225-2016
Рег.удостоверение № РЗН 2017/5521 от 22.03.2017



Комплектность поставки

- 1 – Лежак – 1 шт.
- 2 – Подголовник – 1 шт.
Лежак с подголовником поставляются в скрепленном виде (соединены при помощи картонных петель).
- 3 – Опора – 2 шт.
- 4 – Соединительный элемент опоры – 1 шт.
- 5 – Соединительный элемент опоры с механизмом подъема подголовника – 1 шт.
- 6 – Рычаг подъемного механизма

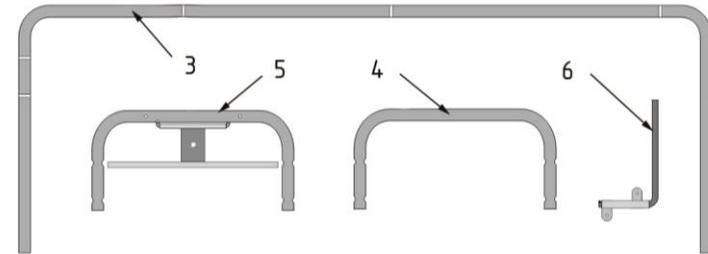

Дополнительная комплектация (инструкция прилагается отдельно)

Полотенцедержатель – 1 шт.


Крепежные изделия

- 7 – Винт потай М6х40 – 6 шт.
- 8 – Винт М5х50 DIN7985 – 8 шт.
- 9 – Гайка М5 – 8 шт.
- 10 – Саморез 4,2х16 с прессшайбой – 2 шт.
- 11 – Заглушка Ø12 наружная – 1 шт.


Вам потребуется: отвертка крестовая или шуруповерт.

Инструкция по сборке


1. Освободить все комплектующие от упаковки
2. Положить на ровную поверхность лежак с подголовником обивкой вниз. Совместить отверстия на опорах (3) с разметкой на лежаке (в эти места уже вмонтированы забивные гайки). Соединить опоры с лежаком при помощи винтов М5х40 (7).

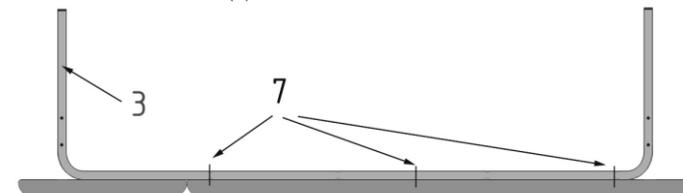

- Соединить между собой опоры (3) и соединительные элементы опор (4 и 5) при помощи винтов М5х50 (8) и гаек М5 (9), таким образом, чтобы механизм подъема подголовника находился снаружи каркаса.

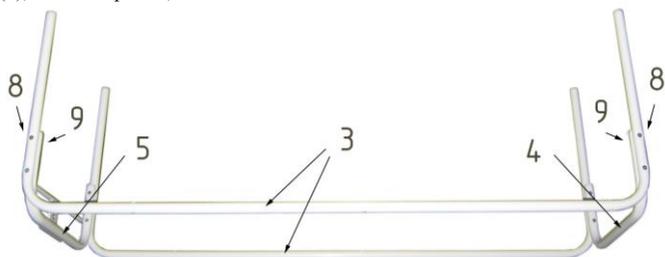

- Вставить рычаг (6) в отверстие на пластине механизма подъема. Расположить его вертикально (см. рисунок). Прикрепить рычаг к подголовнику с помощью саморезов с прессшайбой 4,2х16 (10).

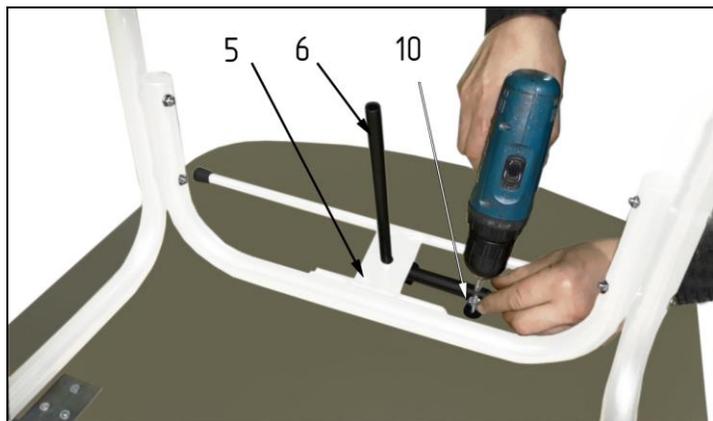

- Надеть на рычаг (6) заглушку (10) во избежание самопроизвольного выскакивания рычага из механизма!

Высоту подъема подголовника можно регулировать, поднимая пластину механизма и одновременно опуская или поднимая сам подголовник.



Правила по эксплуатации мебели

- Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
- Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45-70%.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за кожзаменителем

- Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
 - Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 - Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
 - Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
 - Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 - Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
 - Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Уход за окрашенными поверхностями

- Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б

тел.: (812) 362-42-79

web: www.zavodmebel.ru

E-mail: info@zavodmebel.ru