



ОАО «МИЗ-Ворсма»

ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Технические данные

Инструменты медицинские металлические изготавливаются из нержавеющей стали, из латуни и углеродистой стали с покрытием, из титана.

Изделия медицинские соответствуют
ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 21238-93, ГОСТ 21239-93,
ГОСТ 21240-89, ГОСТ 21241-89, ГОСТ Р ИСО 7492-2009,
ГОСТ 28519-90, ГОСТ Р 53342-2009, ГОСТ Р 53343-2009

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки изделий потребителю. В течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируются или заменяются при условии соблюдения потребителем требований настоящей этикетки. Рекламация в установленном порядке вместе с этикеткой предъявляется предприятию-изготовителю по адресу:

606120, г.Ворсма, Нижегородская обл., ул.Ленина, 86

ОАО «МИЗ-Ворсма»

Тел.(83171) 6-46-04; 6-46-74; 6-50-21; 6-52-94; 6-59-28

Факс (83171) 6-47-66

E-mail: vorsma@mts-nn.ru www.vorsma.com



*Система менеджмента качества
сертифицирована по ГОСТ ISO 13485-2011*

Санитарная обработка

Перед дезинфекцией медицинский инструмент должен быть тщательно отмыт от органических загрязнений.

Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение (45 ± 5) мин. или химическим методом.

Дезинфекция и предстерилизационная очистка (режимы в соответствии с инструкцией по применению препарата) состоит из:

- 1.погружения инструмента в раствор;
- 2.мойки при помощи ерша, салфетки, щетки;
- 3.ополаскивания питьевой проточной водой;
- 4.ополаскивания дистиллированной водой;
- 5.сушки горячим воздухом при температуре $(85 \pm 2 - 10)^\circ\text{C}$ до полного исчезновения влаги

На не полностью высушенном изделии могут появиться следы коррозии.

Стерилизацию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(180 \pm 2 - 10)^\circ\text{C}$ в течение (60 ± 5) мин. или химическим методом.

Изделия с пластмассовыми деталями подвергать химической или газовой стерилизации.

При стерилизации и дезинфекции химическим методом, а также при мойке в растворе, содержащем перекись водорода и моющее средство, рекомендуется применять антикоррозионные добавки.

Сведения о консервации

Изделия законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-0 или ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1.

Для расконсервации инструментов промыть их в теплой мыльной воде.

Сведения о хранении

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от $+40$ до -50°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре $+20^\circ\text{C}$. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Медицинский инструментальный завод в г.Ворсма - старейшее в России предприятие по выпуску медицинского инструмента. Возникшее в начале XIX века (в 2015 году ему исполнилось 195 лет) предприятие продолжает развиваться, используя традиции почти двухвековой давности и создавая новые.

Сегодня здесь выпускают более 1200 наименований хирургических инструментов для всех разделов медицины.

Наряду с этим освоен сложный уникальный хирургический инструмент из титана и твердых сплавов.

На предприятии постоянно ведется работа над улучшением качества. Осваиваются изделия для новых современных технологий.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**Традиционное качество
с 1820 года**

