

Оптическая бинокулярная система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов. Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Поздравляем Вас с Вашим выбором. Перед первым использованием Вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. Доступны следующие бинокулярные системы:

- Увеличивающие очки для близи rido-med;
- Увеличивающие очки для дали tele-med.

Инструкции по технике безопасности

- ✓ Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
- ✓ Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
- ✓ Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств!
- ✓ Берегите от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- ✓ При фокусировке, не проворачивайте за ограничитель.
- ✓ Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

Анатомические корректировки

1. Отрегулируйте по длине.
2. Наклон (угол рамы): отрегулируйте положение головы пользователя.

Регулировка межзрачкового расстояния (PD)

1. Отрегулируйте PD для близи / дали, используя шкалу [2], установленную со стороны глаз на бинокуляре [1]. Поле обзора обоих глаз должно совпадать, т.е. должно появиться только **одно** четкое изображение. Поднесите систему Галилея как можно ближе к глазу, чтобы обеспечить максимально возможное поле просмотра для пользователя.
2. Как только PD установлен, заблокируйте держатели окуляров [3] с помощью зажимов [4].

Корректировка просмотра

1. Сделайте коррекционную линзу 22 мм.
2. Приложите коррекционную линзу с помощью вложенного кольца со стороны глаз на системе. Если корректировка глаза не требуется, окуляр [5] может быть оснащен крышкой [6].
3. Кольцо фокусировки можно вращать [7] для точной фокусировки. Систему можно сфокусировать ±5 диоптрий по сфере. Кольцо фокусировки сложно поворачивать, чтобы не сбить настройки фокуса.

Инструкции по уходу

- ✓ При очистке не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!
- ✓ Не очищайте систему в ультразвуковой ванне или в проточной воде!
- ✓ Очистите объектив мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

Технические характеристики

	rido-med			tele-med	
	16362	16363	16364	1634	16344
Кратность	2.5x	3.0x	4.0x	3.0x	4.0x
Поле зрения, мм	91 / 350	54 / 200	34 / 250	160 / 1000	130 / 1000
Угол обзора	15.0°	12.5°	8.0°	9.5°	7.5°
Рабочая дистанция, мм	≈ 350	≈ 200	≈ 250	700 - ∞	780 - ∞
Диаметр линзы	23 мм	23 мм	23 мм	23 мм	23 мм
Вес	116 г	116 г	116 г	116 г	116 г
Настройка диоптрий	±5 дптр.	±5 дптр.	±5 дптр.	±5 дптр.	±5 дптр.

Сделано в Германии. Изготовлено из высококачественных материалов.
Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).

Соответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.
Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13).
Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.

Товар не подлежит обязательной сертификации



Гарантия

В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.

Гарантийный талон:

Дата продажи: _____

Артикул: _____

Наименование продавца: _____

М.П.