



# maxDETAIL

## Инструкция к применению оптической системы maxDETAIL®.

Ваше новое приобретение – изделие высокого качества от завода Eschenbach.

Это первоклассный "Сделанный в Германии" продукт был произведен с использованием самых современных методов.

### Мы поздравляем Вас с Вашим выбором!

Вам, нужно работать обеими руками с хрупкими, мелкими элементами и Вам нужна третья – для того, чтобы держать лупу и рассматривать мелкие детали?

С оптической системой maxDETAIL® Ваши руки будут свободны, т.к. эти увеличительные стекла (бинокулярная лупа) надеваются как обычные очки.

### Правила техники безопасности

**1** Опасность ослепления или травмы.

Никогда не смотрите на солнце или другие источники света с помощью оптических устройств.

**2** Риск воспламенения!

Линзы, используемые в оптическом оборудовании, могут нанести значительный ущерб из-за их "эффекта воспламенения", если используются или хранятся ненадлежащим образом. Не оставляйте линзы под прямыми солнечными лучами.

**3** Удостоверьтесь, что другие люди и особенно дети знают правила техники безопасности!

**4** Оптическая система maxDETAIL® не должна использоваться во время передвижения.

**5** защитите свои maxDETAIL® от ударов, влажности и чрезмерно высокой температуры. Никогда не помещайте maxDETAIL® рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников открытого огня.

### Регулировка

- Простота в использовании, благодаря свободной регулировке межзрачкового расстояния.

- Дужки очков можно легко приспособить (согнуть-разогнуть) под Ваши потребности. Они приобретают необходимые формы без нагревания и "запоминают". И так же легко им придать любую другую форму. На основе титановых стержней.

- Великолепное качество изображения, благодаря широкому диапазону фокусировки и просветленным линзам.

- Подходят для людей с ослабленным зрением, потому что возможна диоптрийная коррекция от - 3,0 до + 3, 0 диоптрий для правого и левого глаза по отдельности.

- Держите левый глаз закрытым и поверните кольцо, пока изображение, видимое Вашим правым глазом, не будет находиться в фокусе. Сделайте то же самое другим глазом.

- Для того, чтобы maxDETAIL® не скользили, Вы можете использовать подкладки на концах заушников.

- Вы можете использовать шнурок (в комплекте не предусмотрен) продев его в отверстия на концах заушников для более удобного применения.

### Примечания

При следующих обстоятельствах видимое изображение может быть неотличного качества:

**1** Если дужки maxDETAIL® разведены слишком широко, например, из-за необычно большой головы, может произойти удвоение изображения, потому что оптические оси двух систем линз не параллельны.

**2** Очень маленькое или очень большое межзрачковое расстояние может уменьшить качество работы, потому что изображение не просматривается через оптические зоны maxDETAIL®.

**3** Если Ваши обычные очки с диоптриями вне диапазона -3.0 до +3.0 диоптрий, maxDETAIL® не может полностью компенсировать слабовидение. В этом случае, попробуйте изменить регулировку, пока изображение не попадет в фокус.

**4** Если Вы обычно носите очки с цилиндрическими линзами (например, для астигматизма), невозможно достигнуть прекрасного фокуса. Это зависит от силы цилиндра.

### Инструкции по уходу

maxDETAIL® - высококачественная, технологически продвинутая, сложная оптическая система, она нуждается в правильной обработке и заботе.

Для защиты от пыли и внешних воздействий, мы рекомендуем, хранить очки в кейсе (футляре), поставляемом с очками.

Не используйте моющие средства, которые содержат смягчители, спиртосодержащие, основанные на алкоголе, растворители или абразивные вещества. Они могут повредить линзы.

Чтобы удалить загрязнение тщательно протирайте линзу влажной тканью.

Не мойте maxDETAIL® под проточной водой или в сверхзвуковой, или ультразвуковой мойке!

### Технические характеристики

- Артикул: 162451

- Увеличение (кратность): 2.0 x

- Вес всего 49 грамм

- Межзрачковое расстояние: 60-68 мм

- Расстояние до рассматриваемого объекта (рекомендуемое рабочее расстояние): 40 см

- Поле зрения: 10 градусов, 13 см / 40 см

- Диоптрийная коррекция +/- 3.0 диоптрии, отдельно для правого и левого глаза, цилиндрическая коррекция не возможна.

По вопросам приобретения оптических систем производства завода Eschenbach (Эшенбах) обращайтесь:

Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации,  
Казахстане, Беларуси: ООО «Мир зрения»

107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.

тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60;

e-mail: info@mirzreniya.ru

www.mirzreniya.ru



**МИР ЗРЕНИЯ**  
важна каждая мелочь

Сделано в Германии.  
Eschenbach Optik GmbH  
Nürnberg · Germany

**ESCHENBACH**