

RU Стетоскоп серии WS, модель WS-2

Профессиональный стетоскоп с двусторонней головкой

Изготовлен из высококачественных материалов.

Стетоскоп WS-2 предназначен для диагностики сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование.

Противопоказания: противопоказаний не выявлено.

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Комплектация:

1. Трубка соединительная для стетоскопа, прочная литая из PVC
2. Головка для стетоскопа, легкая алюминиевая, двусторонняя, купол оснащен пластиковым кольцом
3. Трубка бинауральная, хромированная
4. Насадки для ушей, мягкие эргономичные
5. Мембрана, высокочувствительная

Утилизация: может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3080 от 23.08.2018 г.
ISO 13485:2012; ISO 9001:2008; Соответствует директиве ЕС 93/42.

Гарантийные обязательства:


Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения стетоскопа. Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** и на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru или www.bwell-swiss.ru

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Дата изготовления указана в номере LOT:
номер недели, последние две цифры года.

Расшифровка символов:

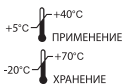

Ограничение по температуре применения +5 - +40 °C

Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C



Сертификация CE Производитель LOT Номер партии



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство